



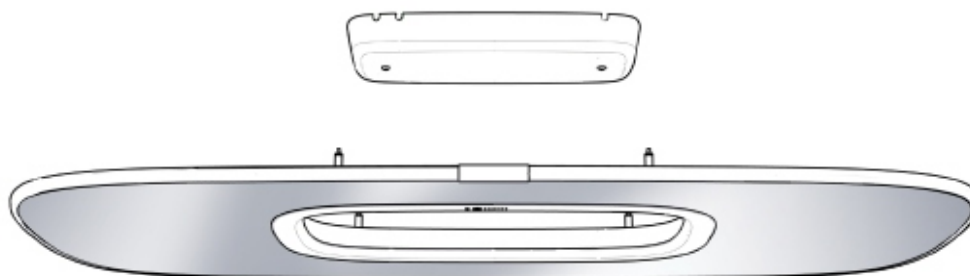

Halo

návod k montáži
a provozu

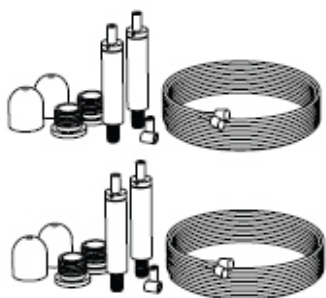


Poznámka: Nepoužívejte ostré předměty při vybalování svítidla!

1. Vybalení Halo


Opatrně otevřete obal bez použití ostrých předmětů!

V balení najdete následující položky:


- Závěsný systém set (4 ks)
- Svítidlo Halo
- Napájecí a ovládací box pro montáž na strop
- Dálkové ovládání s držákem

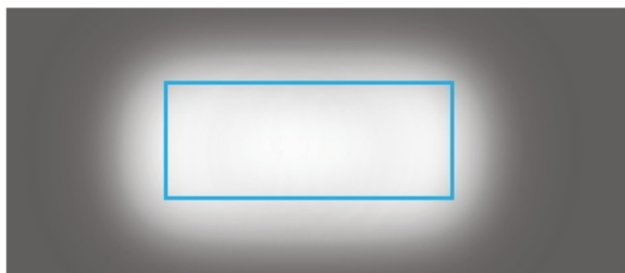

Pracovní deska


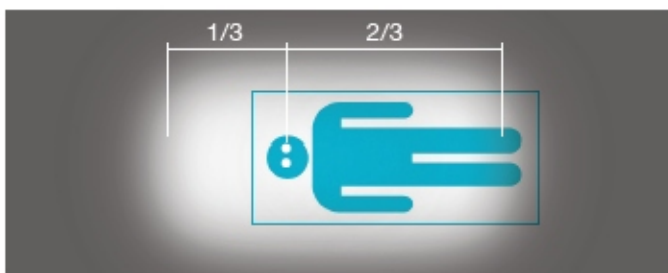


Paralelní pozice. Oči pacienta by měli být v 1/3 svítidla.

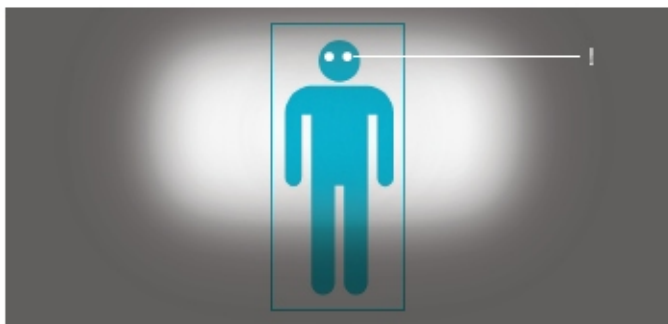



Pozice napříč. Oči pacienta by měli být na úrovni horního okraje svítidla

Poznámka: Ovládací box by měl být namontován pouze na stropě!

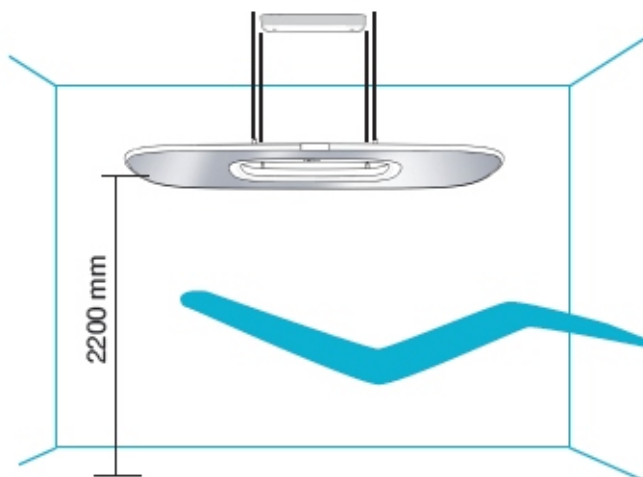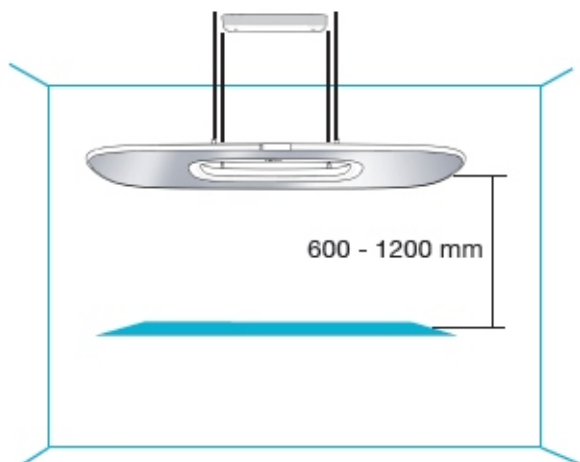

2. Umístění Halo




Výška svítidla by měla být asi 600 - 800 milimetrů nad pracovní oblastí.

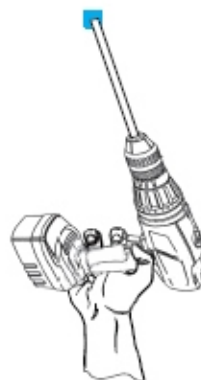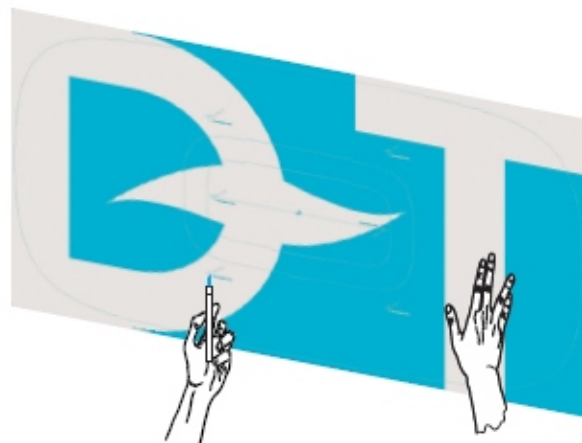

3. Příprava na montáž vašeho Halo

Po vybalení svítidla můžete použít obal jako vodítko pro značení upevňovacích bodů na stropě.

- Použijte přední část obalu a vytvořte otvor pomocí šroubováku.
- Kartonový obal umístěte na strop, vyznačte kotvicí body a vyvrtejte otvory připevnění úchytů.

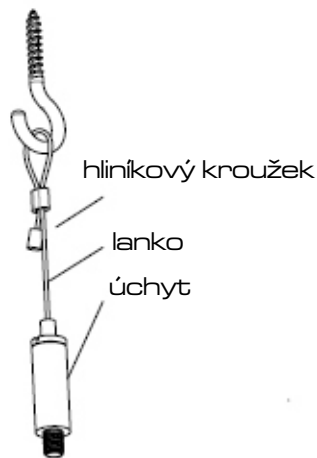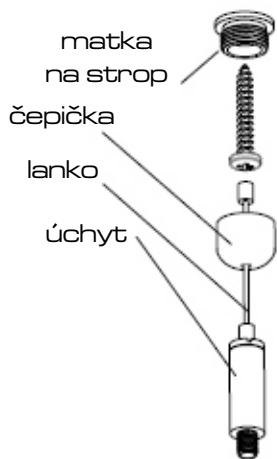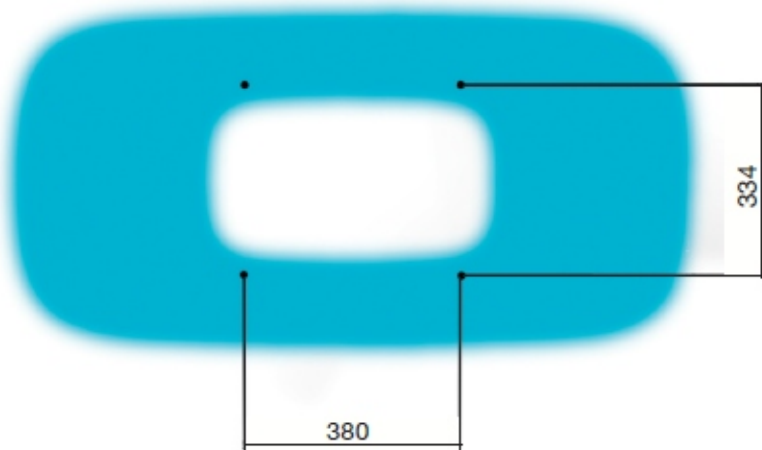


4. Závěsy Halo

Tyto závěsy jsou obsahem balení. Vyberte se jakou variantu závěsu využijete.




5. Světelné podmínky pro chirurgii. Obrázek preferovaných světelných podmínek pro operační sály.

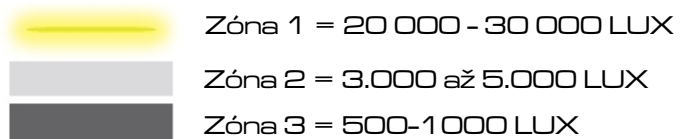


Pozor! Snižte intenzitu světla při práci s vytvrzovacími materiály.





6. Světelné podmínky pro vyšetření. Obrázek preferovaných světelných podmínek pro výsledkových místností.

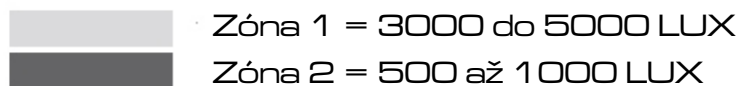

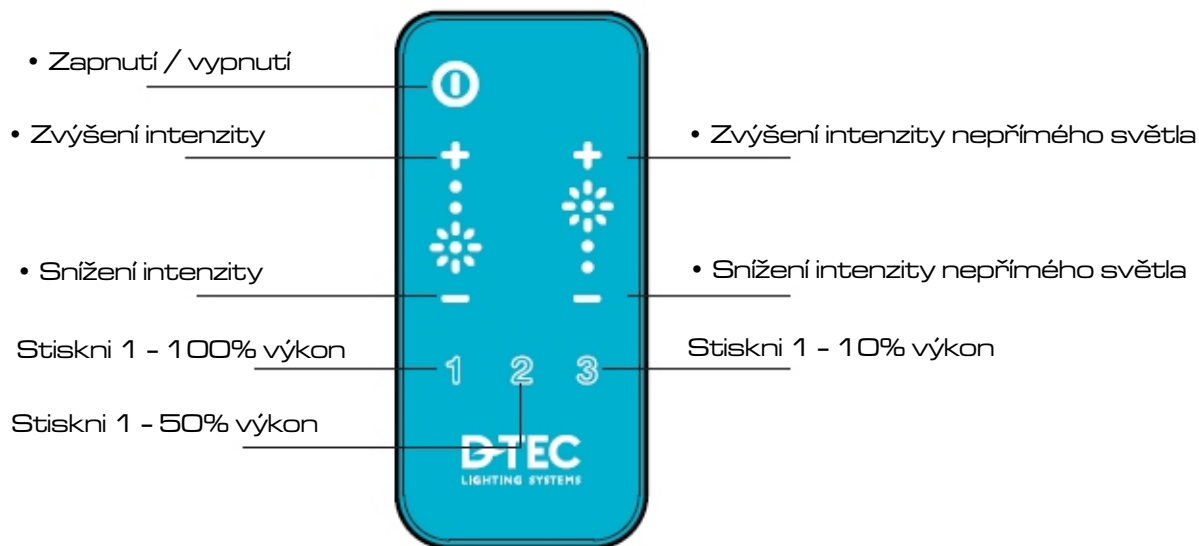

7. Dálkový ovladač

Svítilno Halo je vybaveno dálkovým ovládáním všech funkcí. Tento dálkový ovladač je dodáván s držákem, který by mohl být namontován na zeď, stůl apod.

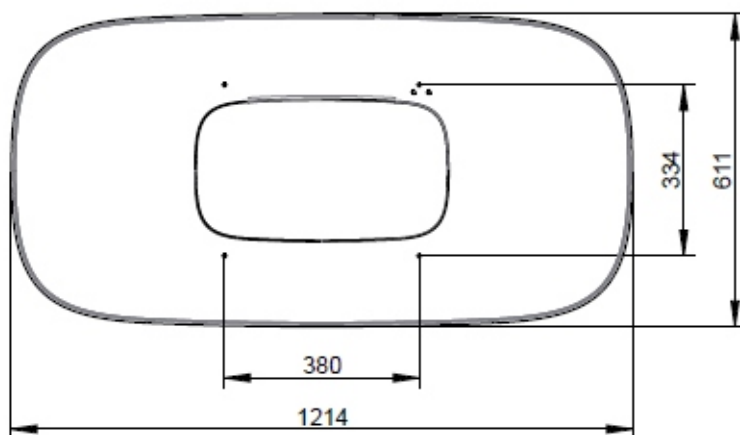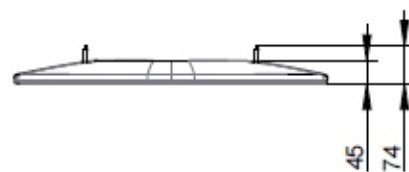

8. Halo rozměry



Data: HALO H1200

- Vysoký výkon-200 - 3000 LUX / 1,2 M
- 90 -240 V
- 5500K Ra90
- Strmívač vypínač
- Úspory energie.
- Dálkové ovládání
- Rozměry: 1214 x 611 x 45 mm.
- Hmotnost: 13,5 kg

CACAN CZ, s.no.

Azalková 928

263 01 Dobříš

GSM: +420 602 102 093

tel./fax: +420 318 523 919

e-mail: info@cacan.cz

<http://www.cacan.cz>

skype: michal.dudla