
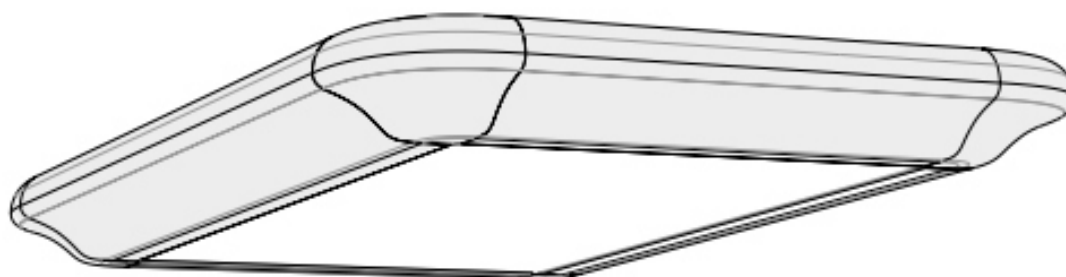


Manuál
T5 300 EL
T5 300 EL CDP
Economy

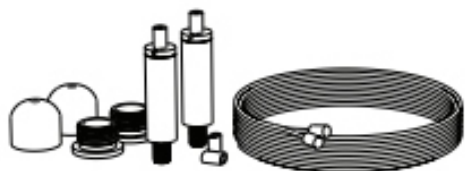


Poznámka: Nepoužívejte pro rozbalení svítidla
ostré předměty!

1. Rozbalení CACAN T5 300 EL-IN


Opatrně otevřete balení bez použití ostrých předmětů!

V balení najdete následující položky:



- sada závěsů svítidla (4 ks)
- svítidlo CACAN T5 300 EL

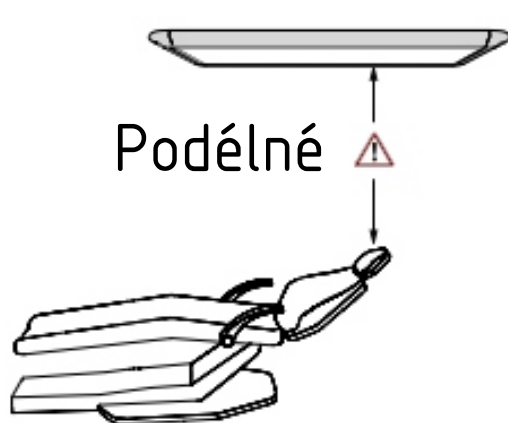

Podélné

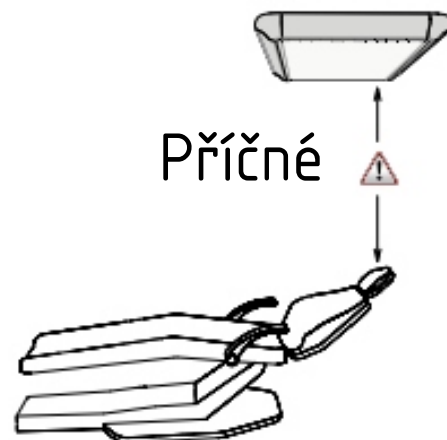

Příčné

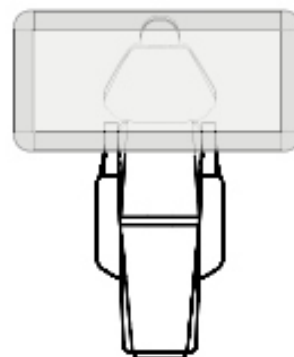
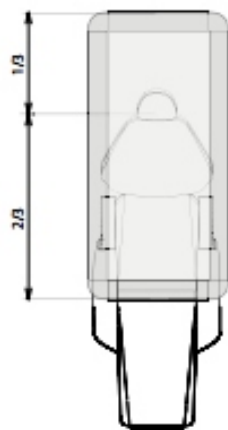


2. Vyberte si umístění svítidla.


- podélné umístění - osa světla kopíruje osu křesla (nejčastější)
- umístění napříč - osa světla kolmá na osu křesla

Výška spodní hrany svítidla od země doporučena 220 cm.




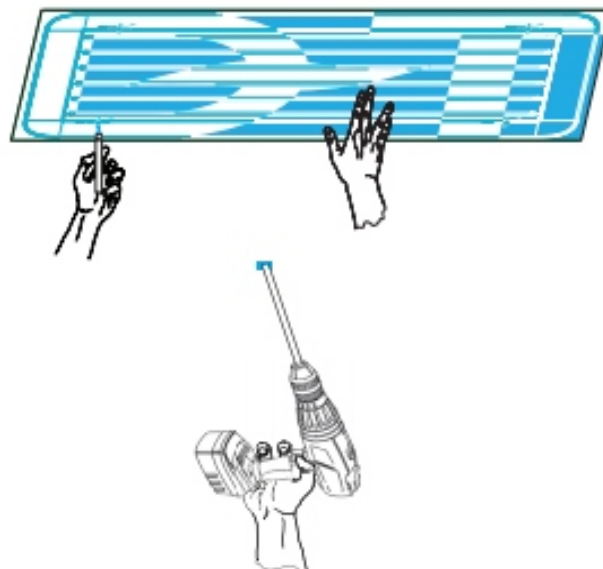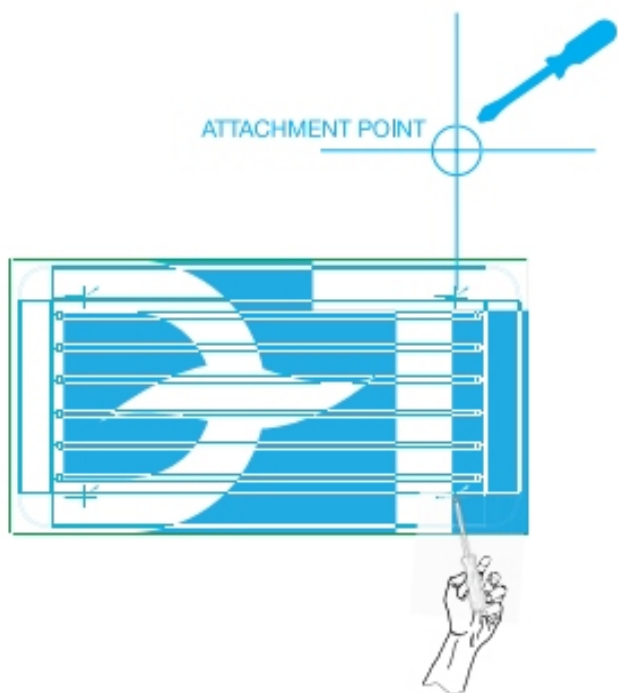

T5 300 EL

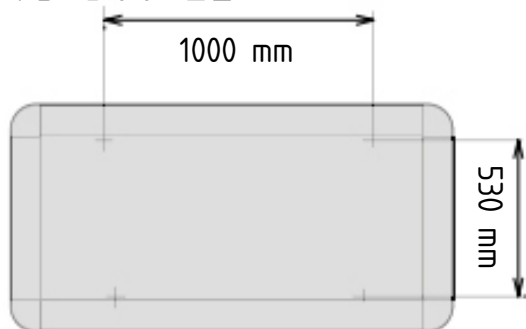


Economy

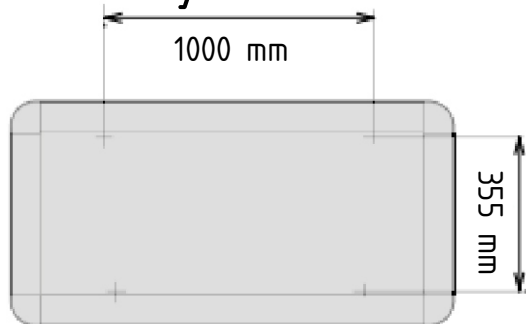


3. Příprava montáže

- Pro montáž použijte šablonu z horní strany víka.
- Víko odřízněte, propíchněte vyznačené montážní body.
- Víko položte na strop do požadované polohy a překreslete na strop montážní body.
- Odvrtejte body 8 - 10 mm vrtákem dle typu stropu.

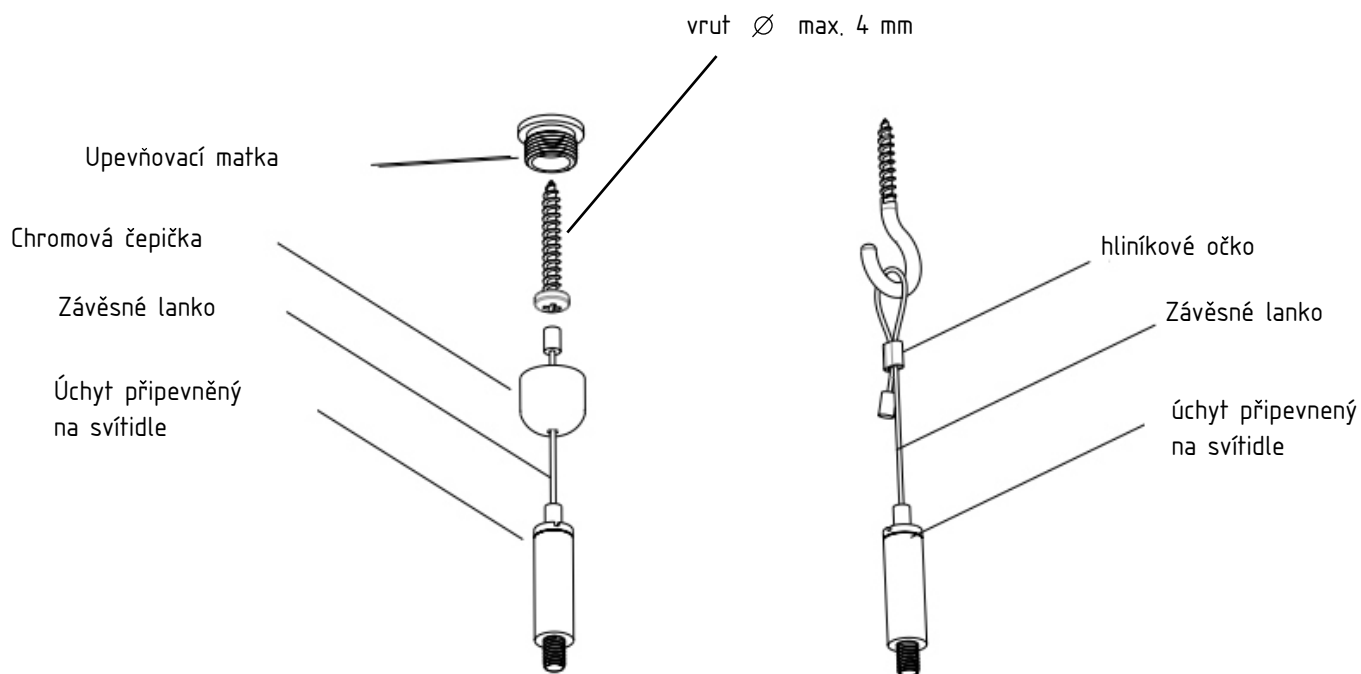


4. Zavěšení svítidla CACAN T5 300 EL

Tyto položky jsou v základním vybavení svítidla.
Vyberte si variantu podle vašich potřeb.

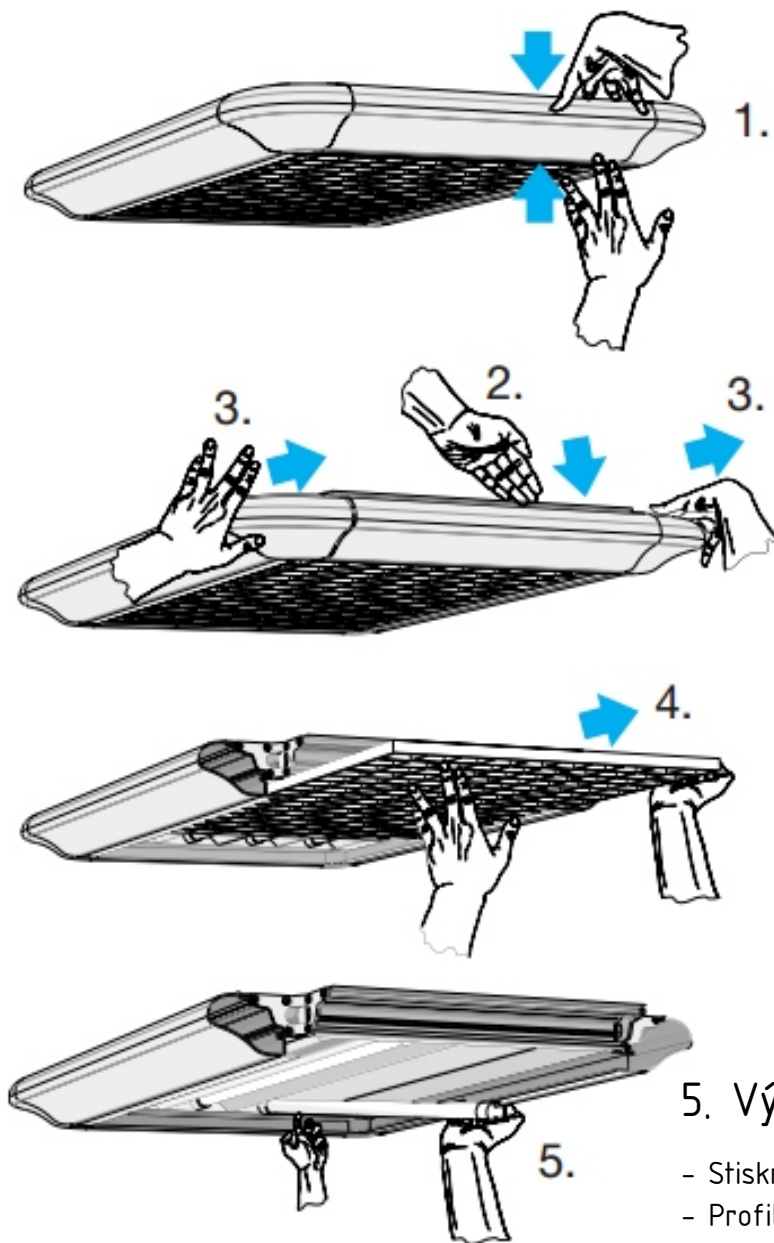

5. Výměna zářivkových trubíc

- Stiskněte kratší boční profil a stlačte jej dolů.
- Profil i plastové rohy se uvolní.
- Vytáhněte difuzor.
- Přístup k trubícím je volný.
- Pro uvolnění krytu nepřímého světla je zapotřebí částečně povolit 3 šrouby rohového kovového profilu, který spojuje rám svítidla.

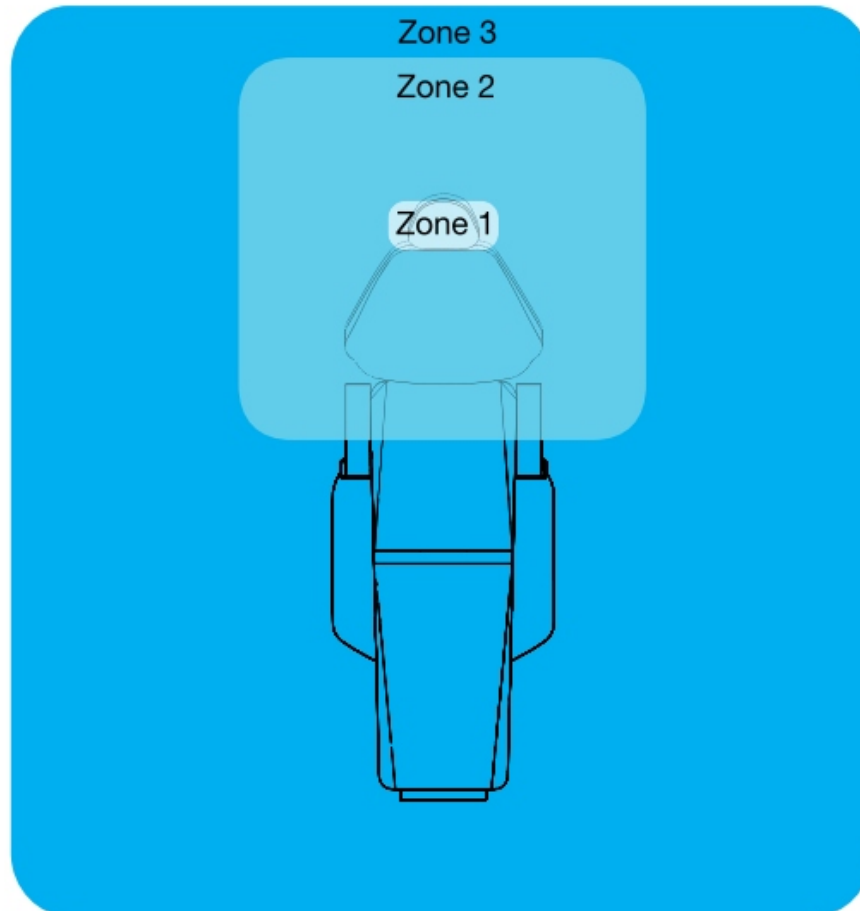

6. obecné informace

Obrázek preferovaných světelných podmínek pro zubní lékaře.

- Zóna 1 = 20 - 40 000 LUX
- Zóna 2 = 3 - 5000 LUX
- Zóna 3 = 500 - 1000 LUX

Údaje: CACAN T5 300 EL

- Vysoký výkon – 4.500 lux.
- Ekologické a energeticky úsporné.
- Nepřímé osvětlení (osvětlení vzhůru).
- Rozměry: 1.355 x 700 x 55 mm.
- Hmotnost: 11 kg.

CACAN CZ, s.r.o.

Na Vlačce 1947

263 01 Dobříš

GSM: +420 602 102 093

tel./fax: +420 318 523 919

e-mail: info@cacan.cz

http: www.cacan.cz

skype: michal.dudla



Likvidace výrobku T5 300 EL

Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyhazovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány.

Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno.



CACAN | **DTEC**
CZ | LIGHTING SYSTEMS